

Instrukce pro vrácení a recyklaci Oční Masky

Na konci každého 12 týdenního léčebného cyklu, Oční masku vložte do předplacené obálky a pošlete zpět distributorovi k vyhodnocení léčebného cyklu a recyklaci Oční masky. Pro každý další 12 týdenní cyklus potřebujete novou Oční masku.

Pokyny pro správné použití (správná údržba)

Látkové pouzdro se může čistit pouze po vyjmutí POD. K jejímu čištění použijte pouze teplou vodu bez použití silných čistících prostředků. Nežehlete a nepokládejte na horké povrchy k uschnutí. Nepoužívejte, dokud pouzdro není úplně suché.

Netřeste, netlučte a neupusťte zařízení POD.

Vyhňte se ukládání do míst s vysokou vlhkostí, prachem nebo tepelnému záření.

Udržujte v suchém a čistém prostoru.

POD můžete čistit pouze k tomu určenými látkovými utěráky.

POD je enkapsulován pro bezchybnou funkcionálnitu. V PODu jsou integrované baterie, které se nesnažte z ochranného obalu vyjmát a dobíjet.

Poškození enkapsulace znamená okamžitou ztrátu záruky.

FAQ – Často kladené dotazy

Jak často a jaký je doporučený čas na jednu léčbu denně?

Oční Masku se používá jednou denně a to v noci při spánku. Denní dávka světelné terapie je naprogramovaná dle pacienta a indikace od jeho lékaře.

Mám omezený komfort spánku a ráno se cítím nevyspalý.

Upravte látkové pouzdro tak, aby Vám co nejlépe sedělo na obličej. V případě, že nepomůže ani tato úprava, kontaktujte svého prodejce.

Je Oční Masku určená pro každého?

Oční Masku je zdravotnický prostředek pro léčbu DR a její použití podléhá doporučení vašeho lékaře.

Je Oční Masku bezpečná?

Ano, Oční Masku je 100% bezpečná v případě, že se používá v souladu s tímto návodem. Její bezpečnost je zajištěna enkapsulací PODu a velmi nízkým napětím ze dvou mincových baterií. V případě, že je Oční Masku používána v souladu s tímto návodem, nehrozí žádný možný úraz.

Jak dostanu novou a vrátím starou Oční masku?


Svoji první Oční Masku obdržíte poštou od výhradního prodejce, či si ji osobně převezmáte v oficiálních výdejních centrech, na základě indikace od vašeho lékaře. Každou další Oční masku obdržíte automaticky poštou dle délky léčebného cyklu. Oční masku, po ukončení 12 týdenního léčebného cyklu, vložte do přiložené předplacené obálky a pošlete zpět distributorovi.

Obsah balení

Látkové pouzdro, 2x



POD, 1x

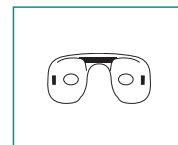

Návod k použití, 1x



Technické specifikace

Typ produktu: Zdravotnický prostředek (světelná terapie na léčbu Diabetické Retinopatie) pro domácí použití

Návod k použití: Odkaz na uživatelský manuál
Bezpečnostní opatření: Odkaz na uživatelský manuál

Hmotnost: 57g

Licence: SGS CE0120

Oční maska je zdravotnickým prostředkem třídy IIa, který odpovídá požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích pro jeho uvedení na trh na území EU.

Oční Masku byla schválena pro použití v zemích

EU a proto je opatřena značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u distributora. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční servis zabezpečuje distributor: ELON MEDICAL, s.r.o.

Kořenského 1052/4, 150 00 Praha 5

Tel.: 724 935 438

Email: info@elonmedical.com

Web: www.elonmedical.com

Pod Polyphotonix Medical Ltd.
Thomas Wright Way
Sedgefield
County Durham
TS21 3FG United Kingdom

2012 - 11 2013 - 09 IP22

CE 0120

LOT 001

Látkové pouzdro

Chraňte před ohněm a vysokými teplotami

Vnější vrstva: 100% nylon / 100% polyuretanová pěna / 100% polyester

Vnitřní vrstva: 100% polyester

Vnitřní pěna: 100% polyuretan

Suchý zip: 100% nylon

Lepidlo: 100% polyuretan



Vysvětlivky

Jméno a adresa výrobce	Série
Datum výroby	Nebějte
Spotřebujte do	Nečistěte chemicky
Udržujte v suchu	Ruční mytí do 40 °C
Nepatří do komunálního odpadu	Nežehlete
CE značka	Neždímejte
Dle návodu k použití	Nesušte v sušičce
Recyklujte vrácením prodejci	

ELON MEDICAL, s.r.o.
Kořenského 1052/4
150 00 Praha 5
Email: info@elonmedical.com
Web: www.elonmedical.com

Poznámka pro uživatele

K dosažení maximálních léčebných účinků při použití Světelné oční masky ("Oční Maska") a pro předejití možným rizikům je důležitým, aby uživatel rozuměl zacházení s touto Oční Maskou a řídil se pokyny uvedenými v tomto návodu. Pro správné použití a plné využití všech vlastností výrobku prosím pozorně čtete návod k obsluze před prvním použitím. Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené zanedbáním pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k použití obsahuje popis a pokyny k použití této Oční masky. Výrobce a distributor si však vyhrazuje právo změny technických parametrů, vlastností a tiskových chyb.

Indikace pro použití

„Oční Maska“, je zdravotnický prostředek navržený tak, aby pacientovi doručil, přesnou míru světelné terapie v jeho spánkovém režimu, při léčbě Diabetické Retinopatie. Oční Maska byla vyvinuta důkladným zkoumáním a dlouhým výzkumem, je velmi bezpečná, nicméně, pro vaše bezpečné užívání si prosím před použitím pečlivě přečtete návod k použití.

Oční Maska je naprogramovaná, aby se dala používat pouze v nočním režimu a to od 20.00 do 8.00 hodin a aby poskytovala pacientovi kontrolovanou dávku světelné terapie každou noc po dobu 12 týdnů. Po uplynutí

12 týdenního cyklu se Oční Maska deaktivuje a pacient ji v předplacené obálce vrátí, pro účely vyhodnocení léčebného cyklu a k její recyklaci. Pro další léčbu, bude pacientovi poskytnuta nová oční maska, dle jeho léčebného cyklu, vždy před jeho započítáním.

Kontraindikace ke světelné Oční Masce

Tento léčebný prostředek je určen pouze k léčbě Diabetické Retinopatie.

Varování a bezpečnostní pokyny před použitím (opatření)

- Oční Maska se musí používat pouze v souladu s tímto návodem k použití a její užití podléhá konzultaci a doporučení vašeho lékaře (Oftalmolog, Praktický Lékař, Optik či Diabetolog).
- Oční masku používejte pouze pro navržený účel.
- Oční Masku nepoužívejte v případě, že obal Oční Masky vykazuje znaky jeho porušení nebo předchozího otevření. Oční Masku dále nepoužívejte při viditelném poškození komponentů Oční Masky (látkový obal, POD).
- Nevystavujte Oční Masku vysokým teplotám, a udržujte ji čistou a skladujte v suchu.
- V případě poruchy či nefunkčnosti (nesvítí zelené světlo po uvedení do chodu), ihned kontaktujte oprávněného obchodního zástupce či distributora.

- Nezkoušejte zařízení opravovat sami nebo jinou neoprávněnou osobou (vede ke ztrátě záruky). POD je enkapsulován a POD je určen k použití po dobu jednoho měsíčního cyklu.

- Udržujte Oční Masku a její součásti z dosahu dětí.

- Oční masku nepoužívejte, máte-li otevřenou ránu na obličeji, která je s ním v přímém kontaktu.

- POD se nesmí sterilizovat, být čištěn vodními roztoky či jakýmkoliv tekutinami.

- Oční Masku byste měli sundat z očí před vstáním z postele, aby se předešlo riziku pádu.


- V případě, že pacient trpí alergickou reakcí na textilie, Oční masku nepoužívejte.

- Oční Maska je produkt, vyměnitelný na 12 týdenní bázi a použitelný pouze pro jednoho pacienta.


- Oční Maska a její použití v kombinaci s ostatními metodami léčby, podléhá schválení a doporučení pouze od vašeho lékaře.

Ovládací pokyny


- 1 Vyjměte komponenty Oční Masky z příbalového balení.
- 2 Oční Maska má dvě části. A) Jemné látkové pouzdro, do kterého se vkládá B) POD.
- 3 Světlo vyzařující jednotka je POD. Je předprogramovaná pro jeden měsíční cyklus.

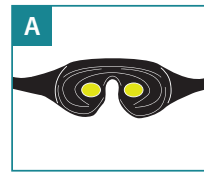

Látkové pouzdro

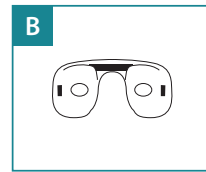


POD

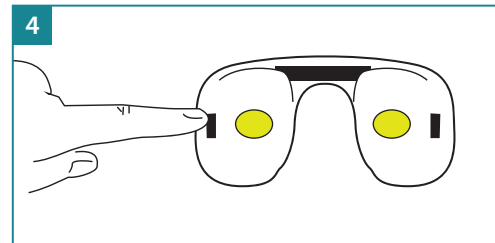

Před ulehnutím ke spánku, zapněte POD, krátkým stiskem indikátoru ON. POD začne svítit zeleně a je připraven k použití.



Zasuňte POD do látkového pouzdra.

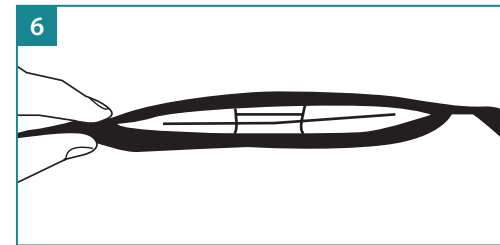

Zkontrolujte, zda-li je POD na svém místě.



POD je správně umístěn v případě, že vidíte přes látkovou masku v prostoru pro oči zelené světlo.



Upravte si pásek se suchým zipem na látkovém pouzdra tak, aby vám co nejlépe pouzdro drželo na hlavě.



Nyní můžete ulehnout ke spánku s Oční Maskou na očích. Když ještě před usnutím Oční maska přestane svítit, opakujte kroky 3–7. Oční maska bude v provozu pouze 3 minuty bez toho, aniž byste ji měli nasazenou na obličeji. Až po jejím správném nasazení, oční maska funguje po celou dobu tak, jak je předprogramována její světelná dávka. Při přerušení cyklu v průběhu noci, ho můžete obnovit opakováním kroků 3–7.